

HANITA VISCO



PROPIEDADES

HanitaVisco es una versátil solución viscoelástica para inyección intraocular. Se trata de una solución basada en hialuronato de sodio de viscosidad media, isotónica, apirógena y no inflamatoria.

ENVASE

La solución viscoelástica HanitaVisco se suministra estéril en una jeringa de 1 ml de un solo uso, esterilizada mediante vapor, y envasada en una bolsa de fácil apertura. También se suministra una cánula estéril curva con punta roma del número 27 de un solo uso.

FÓRMULA

1 ml de solución HanitaVisco contiene 0,014 - 0,020 gramos de hialuronato de sodio y 0,98 gramos de solución fisiológica con amortiguador, tiene un pH de 6,8 a 7,6, y una osmolaridad de 200- 400 mOsm/kg con una distribución de masa molecular de 1.154.500 g/mol.



INSTRUCCIONES DE USO

Exclusivamente para uso intraocular. La solución Hanita Visco y la cánula son de un solo uso.

Si no se siguen las instrucciones siguientes, la cánula se puede desprender y podrían producirse daños graves al paciente.

1. Abra la bolsa de fácil apertura en condiciones asépticas.
2. Quite la tapa de goma de la punta de la jeringa.
3. Quite y deseche la vaina protectora de plástico de la cánula (Si se suministra).
4. Sostenga la cánula con una mano y el cilindro de la jeringa con otra.
5. Inserte la cánula en la conexión tipo Luer. La cánula debe estar bien enroscada en la conexión tipo Luer, y esta debe estar bien acoplada a la jeringa.
6. Inspeccione visualmente la cánula y la conexión tipo Luer. La cánula debe estar bien enroscada en la conexión tipo Luer, y esta debe estar bien acoplada a la jeringa.
7. Extirpar la OVD mediante irrigación y/o aspiración al final de la cirugía.
8. Antes de continuar con el procedimiento, presione el émbolo para expulsar el aire de la cánula, y compruebe que la unidad formada por la jeringa y la cánula funciona perfectamente.

NOTA: la solución HanitaVisco deben usarla profesionales sanitarios conforme a su propia formación y experiencia. Consulte más abajo las referencias a los procedimientos quirúrgicos. Informe de cualquier incidente grave al fabricante y a las autoridades de jurisdicción local.

INDICACIONES

La solución HANITAVISCO está indicada como material auxiliar para intervenciones oftálmicas en el segmento anterior, como en extracciones de cataratas e implantes de LIO.

CONTRAINDICACIONES

En la actualidad se desconocen contraindicaciones al uso de la solución HANITAVISCO si se emplea como material intraocular quirúrgico auxiliar.

PRECAUCIONES

Se recomienda seguir las precauciones normales de cualquier procedimiento oftálmico. Las soluciones viscoelásticas pueden producir un aumento temporal de la presión intraocular.

- La solución HanitaVisco debe extraerse totalmente del ojo mediante irrigación y aspiración con una solución salina neutra.
- Compruebe la integridad de la bolsa; no use el producto si se ha roto la barrera estéril.
- Compruebe la fecha de caducidad impresa en la bolsa antes del uso.
- No reutilizar. La jeringa y la cánula son de un solo uso. La reutilización de este producto puede afectar a la esterilidad y a la seguridad de la conexión de la cánula.
- No reesterilizar. Si se daña el envase estéril o ha pasado la fecha de caducidad, devuelva el producto al fabricante.

ALMACENAMIENTO

Almacenar a una temperatura entre 10 y 30 °C.