

# VISCOELASTICO UVHA



## DESEMPEÑO Y ESTRUCTURA DEL PRODUCTO

Es una clase de solución viscoelástica transparente con alto peso molecular, el disacárido vinculado está compuesto de ácido glucurónico y N-acetil-D-glucosamina. La preparación es una clase de biomaterial polisacárido degradable. La aplicación de la preparación en la posición correcta durante la operación oftalmológica actúa como relleno para conservar la profundidad de la cámara anterior.

Protegiendo los tejidos oculares; lubricando los dispositivos quirúrgicos y reduciendo las complicaciones posteriores a la cirugía.

## INDICACIONES:

1. Para extracción e implante de lentes intraoculares
2. Trasplante corneal
3. Operación de glaucoma
4. Separación retinal
5. Lesión ocular y cirugía oftálmica

## EFFECTOS SECUNDARIOS:

Ocasionalmente la presión intraocular puede elevarse temporalmente después de la operación. Si ocurre, por favor siga las instrucciones del médico.

## **CONTRAINDICACIONES:**

Hipersensibilidad al hialuronato de sodio y proteínas

## **INSTRUCCIONES DE USO:**

1. Remover de la caja el viscoelástico el cual se encuentra en su bolsa estéril y depositarlo sobre un área no estéril. Antes de usarlo, abra la bolsa estéril, deslice la jeringa y la aguja sobre un dispositivo estéril o remuévalo por medio de otra tecnología aséptica.
2. Verifique si la jeringa está dañada, si el líquido contenido es transparente y no presenta contaminación alguna. Absténgase de usarlo inmediatamente, si no se encuentra en las condiciones adecuadas.
3. Remueva el tapón de silicona de la jeringa y fije la aguja, enrósquela para apretarla.
4. Empuje el émbolo ligeramente hasta que la primera gota de viscoelástico salga por la punta de la aguja.
5. Aplique el Hialuronato de Sodio acorde a los requerimientos de la cirugía.
6. Después de la cirugía, limpie el viscoelástico residual con solución balanceada y deseche la jeringa y la aguja. Asegúrese que la jeringa y la aguja sean desechables.
7. Aplique el Hialuronato de Sodio acorde a los requerimientos de la cirugía.

## **PRECAUCIÓN:**

1. La preparación es estéril, desechable. Por favor no reempaque, re-esterilice ni reúse.
2. Después de sacarlo de la nevera y antes de usarlo, la preparación debe estar por lo menos 20 minutos a la temperatura del quirófano.
3. Antes de usar, verifique si hay sedimentos visibles o contaminantes. Si aparece sedimento o contaminantes, el producto debe ser descartado.

## **ESPECIFICACIÓN:**

jeringa, 1.0ml/jeringa, 1.5ml

## **ALMACENAMIENTO:**

Mantener alejado de la luz y almacenarse a 2°C - 24°C.

## **PERIODO DE EXPIRACIÓN:**

2 años

## **PRECAUCIÓN:**

Si el paquete fue abierto o dañado, el producto debe ser descartado