


CUCHILLETES SIDAPHARM

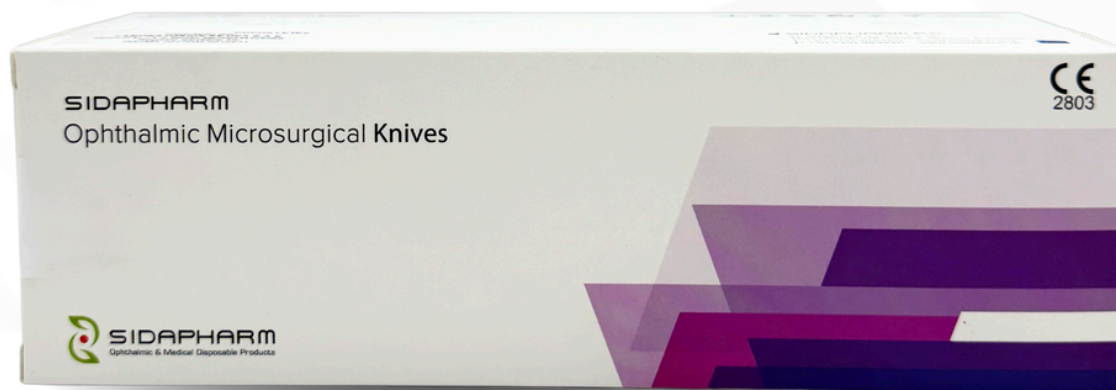

TIPO	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA
 Crescent	Angulado Derecho	62003 62003-1
 MVR	20G Derecho (0.9 mm)	62005
 SLIT	2.20 mm Angulado 2.75 mm Angulado	62016-DB 620181-DB
 STAB	15°	62000

INSTRUCCIONES DE USO

Los cuchillos microquirúrgicos oftálmicos se utilizan durante operaciones de cirugía oftálmica para hacer incisiones precisas, que hacen parte de las condiciones previas para su aplicación en intervenciones quirúrgicas oftálmicas delicadas.

MATERIALES

- Cuchilla: Acero inoxidable Empuñadura
- Cubeta: Policarbonato EMBALAJE Cada cuchillo oftálmico se embala individualmente en una bolsa para garantizar la esterilidad. Disponible en caja de múltiples bolsas.

ADVERTENCIAS / PRECAUCIONES PARA UN MANEJO SEGURO

Lea, siga y guarde estas instrucciones de uso:

- Compruebe su uso previsto y utilice el producto sólo de acuerdo con él.
- Almacenar nuevos productos en un lugar seco, limpio y seguro.
- Evite las altas temperaturas, la alta humedad, la luz solar directa, la inmersión y el almacenamiento a temperatura ambiente.
- No almacenar en un lugar con productos químicos y la aparición de gases.
- Preservar el material de embalaje en un estado de no rotura y sin perforación
- Confirmar el período de uso en cada paquete y caja; Si ha caducado, elimínelo en consecuencia.
- Antes de cada uso, inspeccione el producto en busca de: componentes sueltos, plegados, rotos, agrietados, desgastados o fracturados.
- Si el producto está dañado o defectuoso, no lo utilice y reserve. Evite el contacto de cuchillas delicadas en puntas con superficies duras u otros instrumentos.

CONTRAINDICACIONES - PROHIBICIONES

- La reutilización está prohibida.
- La re-esterilización está prohibida.
- No utilizar después de la fecha de caducidad.
- No utilizar si la condición aséptica del producto se considera dañada por el embalaje roto.

