
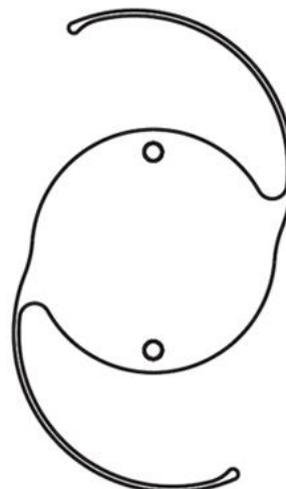


Appalens

LIO RÍGIDO

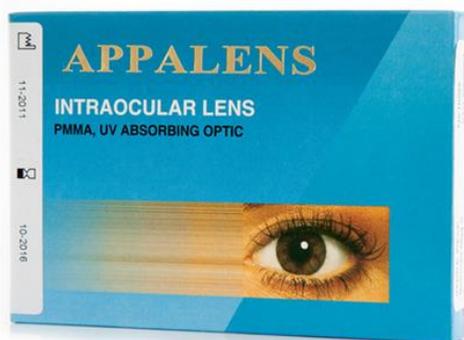

Los lentes intraoculares son implantes ópticos para la lente cristalina humana en la corrección visual de la afaquia. La óptica de la lente está cortada en torno de PMMA con propiedades de bloqueo de rayos UV.

Especificaciones técnicas

Diámetro total.....12.50 mm

Diámetro óptico.....6.0 mm

Diseño óptico.....Biconvexo

Material.....PMMA

Índice de refracción.....1.49

Láser de Y.A.G.....Compatible

Almacenamiento

El paquete sin abrir debe almacenarse en condiciones secas entre 5 ° C y 40 ° C.

Empaque

La lente se suministra en un paquete estéril seco. La esterilización se realiza mediante gas 100% EO. La validez de la esterilización se aplica siempre que la bolsa interna hermética no esté dañada. Cualquier daño en la bolsa desprendible o cualquier apertura accidental de la bolsa desprendible se debe declarar como "No estéril". No usar si el paquete está dañado.

Indicaciones

Catarata monocular

Catarata madura.

Catarata congénita

Necesidades ocupacionales

Catarata traumática.

Instrucciones de uso

Examine la bolsa de despegue, después de un examen adecuado, abra la cubierta y abra la parte superior giratoria sosteniendo la parte inferior de forma segura. Tome la LIO con seguridad con unas pinzas sin dientes. No use guantes en polvo espolvoreados, ya que las partículas de talco serán atraídas hacia la superficie pulida.

Advertencia

La lente intraocular suministrada carece de todas las garantías expresadas o implícitas si

1. La lente es reesterilizada.
2. La lente está alterada de cualquier manera.
3. la lente es reenvasada por alguien que no sea los dispositivos oculares de Appasamy

Precauciones

- Verificar la integridad del embalaje estéril antes de su uso. No utilizar si el embalaje está dañado.

- El modelo IOL de Appalens es solo para un solo uso. No se debe volver a esterilizarse con ningún método.

- Antes de colocarlo en el ojo, no permita que el LIO entre en contacto con sustancias que no sean de esterilidad y, por lo tanto, sean incompatibles



Contraindicaciones

- Uveítis crónica severa
- Distrofia epitelial
- Retinopatía diabética proliferativa
- Hemorragia coroidea
- Microftalmia
- Anirida
- Enfermedad ocular grave concomitante
- Problema de glaucoma
- Catarata rubéola
- Pérdida vítrea masiva
- En cataratas presentes en niños

Constante "A"

El valor constante debe ubicarse en la etiqueta de la tapa de la caja. Este número se proporciona solo como una guía. Se recomienda que el cirujano calcule su propio valor para cada estilo y las especificaciones de la lente intraocular.